# СИДЕНЬЕ-НАКЛАДКА «ДИНА-М01» для рабочих стульев и офисных кресел с эффектом антигиподинамии

Арт.1	Vº M(	01/	

# Руководство по эксплуатации

## Назначение

Изделие предназначено для уменьшения усталости путем равномерного распределения нагрузки на все мышцы спины и малого таза.

Рекомендуется людям, проводящим много времени сидя: кассирам, бухгалтерам, программистам, экономистам и другим работникам, если время непрерывного сидения превышает 40 минут, а общее время нахождения в положении сидя превышает 4 часа в сутки.

**Малоактивный образ жизни** (гиподинамия) приводит к ослаблению мышечного корсета, что существенно ухудшает нейромышечную амортизацию суставов и позвоночника и, как следствие, способствует ускоренному развитию в них дегенеративно-дистрофических изменений.

Организм vстроен так, что лимфодренаж И кровоснабжение обеспечиваются тканей переменным Застойные мышечным TOHYCOM. явления негативно сказываются на здоровье.

В наибольшей степени застойные явления в области таза проявляются при длительном сидении во вращающихся офисных креслах. В результате страдают тазобедренные органы мочеполовой системы. Для суставы предупреждения застойных явлений значение имеет умеренная, но обязательно переменная (не статическая) активность мышечных групп, что и обеспечивает сиденьенакладка «Дина М01».

## Устройство и принцип действия

Эффект антигиподинамии (патент РФ №2229277) обеспечивается встроенной четырехкамерной пневмодроссельной системой, на которую установлено основание с вентиляционными каналами. Вся конструкция размещена в декоративном чехле.

Пневмокамеры, изготовленные из натурального латекса, соединены между собой через дроссели и обеспечивают подвижность И множество **УСТОЙЧИВЫХ** положений поверхности сиденья. Изменение положения поверхности происходит замедленно с небольшим усилием при любом изменении рабочей позы. При этом значительно увеличивается активность мышц туловища. Но поскольку разные группы мышц вовлекаются в работу попеременно, то *<u>усталость</u>* не развивается даже при длительном непрерывном сидении.

Сиденье-накладка «Дина М01» (сиденье) обеспечивает медленное, но непрерывное переключение всех групп мышц туловища и области таза. Время использования в рабочем положении неограниченно. Специальных движений для обеспечения эффекта антигиподинамии выполнять не требуется.

### Подготовка изделия к использованию

Если в процессе транспортировки или длительного использования сиденья произошло стравливание воздуха из пневмокамер, то следует произвести их подкачку следующим образом:

- 1. Положить накладку на стул. Открыть молнию декоративного чехла сидения. Извлечь патрубок для накачки камер, снять заглушку, присоединить микронасос, прилагаемый к изделию.
- 2. Произвести нагнетание воздуха в пневмокамеры через патрубок микронасосом, прилагаемым к изделию, до ощущения комфортной упругости пневмокамер, при этом толщина накладки должна быть ориентировочно 7 8 см.
- 3. По завершении нагнетания отсоединить микронасос, не выпуская воздуха, вставить заглушку в патрубок. Убрать патрубок внутрь декоративного чехла и закрыть молнию.
- 4. Установить сиденье на поверхность стула, кресла, табурета. При этом молния внешнего чехла должна находиться со стороны спинки стула, а ярлык «VITAFON» с левой стороны от сидящего.

Для обеспечения максимального комфорта объем воздуха накачивают согласно своему весу и удобству при сидении. Камеры не должны быть накачаны туго!

# Уход за изделием.

Допускается **сухая чистка** или **ручная стирка** внешнего декоративного чехла при температуре не выше 40°C.

- 1. Расстегните молнию, аккуратно извлеките вкладыш C пневмокамерами ИЗ декоративного чехла. (При необходимости онжом немного стравить воздух ИЗ пневмокамер).
- 2. Постирайте и высушите чехол в расправленном виде.
- 3. Наденьте декоративный чехол на вкладыш так, чтобы патрубок, выходящий из отверстия люверса на вкладыше, находился с той же стороны, что и ярлык «VITAFON» на чехле.

## Условия эксплуатации и хранения

- Условия эксплуатации: при температуре (25±10)°С и относительной влажности воздуха от 45 до 75 %.
- Хранить при температуре не ниже плюс 2°C.
- Максимальная нагрузка на изделие не более 130 кг.

# Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. Срок службы не менее 5 лет.

Замена или возврат изделия осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

### Комплект поставки:

1.Сиденье-накладка	1	шт.
2.Микронасос	1	шт.
3. Руководство по эксплуатации	1	шт.
4.Потребительская тара	1	шт.

### Свидетельство о приемке

Сиденье-накладка Дина «М01» соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. ОТУ».

**Изготовитель:** ООО «ВИТАФОН», Россия 198097, г. С.-Петербург, пер. Огородный, 23, тел. (812) 747-26-48, тел/факс (812) 747-26-27 8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный) E-mail: info@vitafon.ru

www.vsegdazdorov.ru	www.vitafon.ru
<b>Цата выпуска</b>	Дата продажи 
Штамп ОТК	Штамп торгующей организации